

Esploriamo



Docenti

Fiorella Messina
mfquinn@srt.com


Elisabetta Rossi
elisabetta.rossi@iccastelverde.edu.it



GoTalk è una app in Italiano completa, flessibile e facile da utilizzare ma allo stesso tempo molto efficace e in grado di supportare una comunicazione fortemente legata alle immagini e ai contesti di vita dell'utente. Permette inoltre di svolgere in autonomia anche attività didattiche, interattive e ricreative, grazie alla possibilità di inserire file audio e video.

L'applicazione include tre stili di pagine:

- Standard,
- Express
- Immagini (scena visiva)

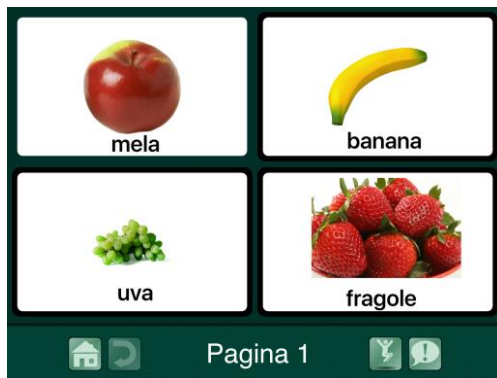

Standard



Express



Scena Visiva

Pagina Standard

Le celle sulla pagina sono interattive. Premendo l'elemento desiderato, l'elemento viene selezionato e viene avviata l'azione legata all'elemento (leggi un messaggio, avvia un messaggio registrato, avvia un video o un file musicale, vai a una pagina specifica del quaderno, vai su Internet, etc)

La selezione avviene premendo l'elemento desiderato




Esempio di pagina Standard

Pagina Express

La pagina contiene una barra messaggio che si può posizionare in alto o in basso.

Le immagini selezionate vengono inviate alla barra messaggio per comporre una sequenza di parole o un messaggio completo.

Come nella pagina Standard, la selezione avviene premendo l'elemento desiderato.

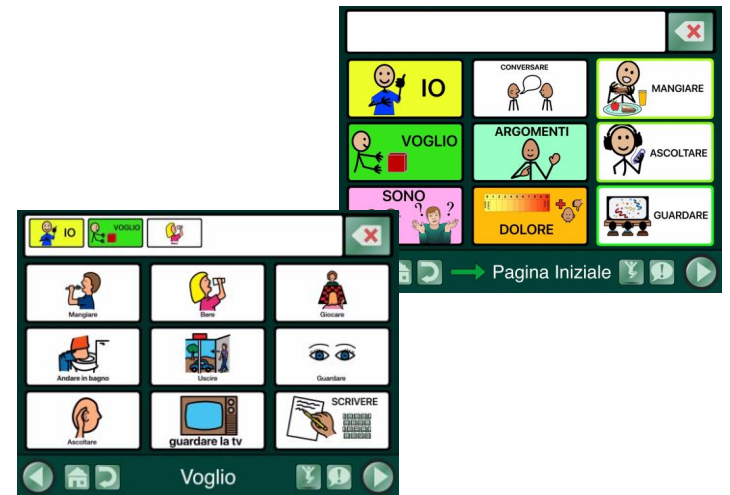

Esempio di pagina Express

Scena Visiva

Le pagine **Scena Visiva** sono invece costruite intorno a una foto o immagine.

In questo caso si possono inserire degli hotspots completamente trasparenti o semitrasparenti in corrispondenza di persone o oggetti della foto e associarvi messaggi vocali, musica o video o collegamenti a altre pagine.




colazione



1. Supporto visivo/simbolico:
 - a. foto: scattate o trovate su Internet
 - b. Video
 - c. Testo scritto o parlato (sintesi vocale-registrazione audio)
 - d. Simboli
 - e. Libreria immagini inserita nella app (cartella immagini GoTalk)

2. Tipi di pagina:
 - a. Pagina Standard in formato griglia, 1-49 pulsanti; nessun limite sul numero di pagine; dimensione pulsanti automatica in base al numero di pulsanti scelto
 - b. Pagina Express (aggiunge una barra messaggio in alto o in basso-impostazioni)
 - c. Scena visiva
 - d. Striscia vocabolario di base (4 celle—8 sperimentali)
 - e. Striscia di frasi (opzionale su scena visiva –Hybrid)

3. Tipi di accesso:
 - a. Selezione al tocco
 - b. Selezione con sensori
 - c. Scansione uditiva

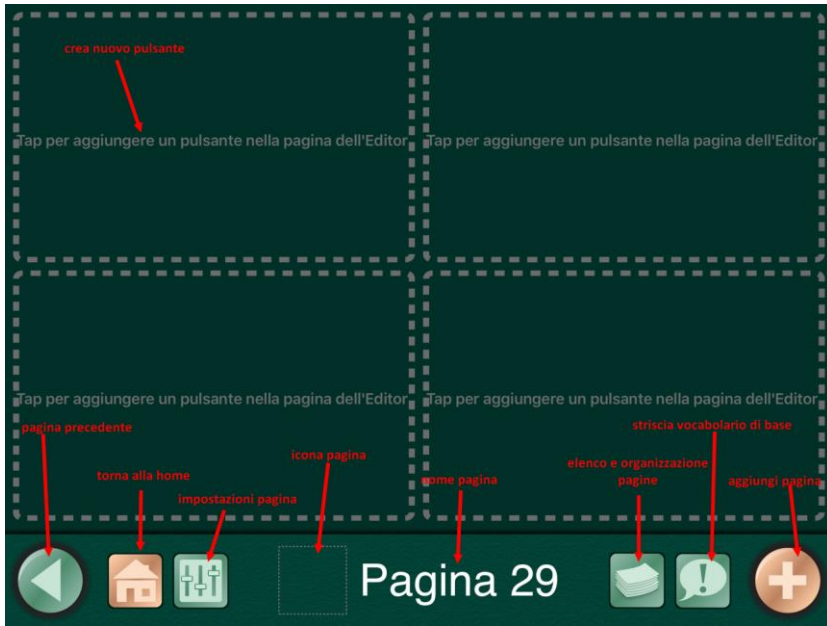

Azioni della cella



Aspetto della cella




4. Avviare la app/uscire dalla app:

a. Fare clic sull'icona della app

i. Selezionare la modalità "utente" per l'utente

ii. Selezionare "Modifica pagina" o "impostazioni" per l'utilizzo da parte del docente/terapista

b. Premere il pulsante "Home" dell'iPad per uscire dalla app e tornare alla schermata iniziale dell'iPad

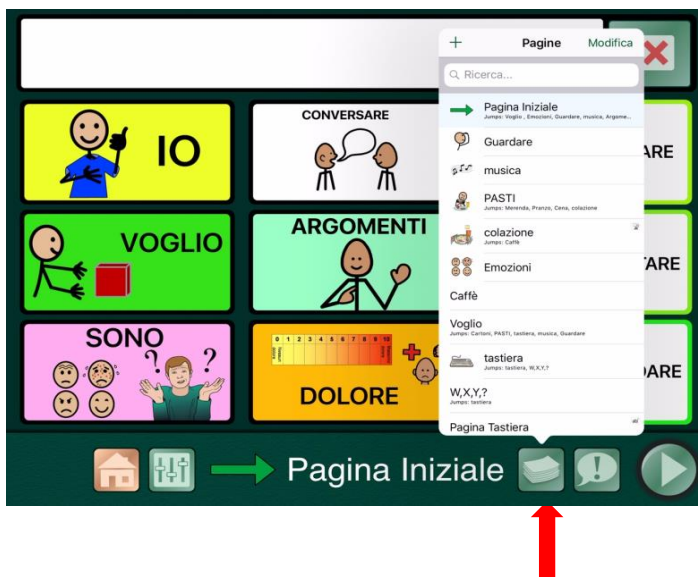

5. Aggiungere una nuova pagina:

a. Selezionare il pulsante "Modifica Pagina"

b. Selezionare l'icona con I fogli

c. Selezionare il + in alto a sinistra

d. Scegliere una delle opzioni disponibile nel menù

e. Se si ha solo una pagina (o se ci trova sul'ultima pagina, selezionare l'icona arancione col + in basso a destra

6. Modificare una pagina preesistente:

- a. Scegliere il pulsante “opzioni pagina”
- b. Modificare, se si vuole, il numero di pulsanti sulla pagina (max 49)
- c. Per modificare un pulsante, fare tap sul pulsante da modificare
- d. Modificare l’etichetta selezionando il pulsante “Testo pulsante”
- e. Aggiungere un’immagine selezionando il pulsante “aggiungi immagine” e scegliere la fonte di ricerca. Poi ricercare l’immagine desiderata digitando una parola chiave nel campo di ricerca (in alto)
- f. Aggiungere una azione (messaggio di sintesi vocale, registrazione audio, filmato, pagina internet, file audio, apertura pagina, Internet),
- g. Selezionare un colore per il bordo e per lo sfondo del pulsante

7. Creare una pagina in formato “Scena visiva”

- a. Aggiungere l’immagine che farà da sfondo selezionando l’icona con le forme (in basso a destra)
- b. Scegliere la fonte di ricerca
- c. Digitare una parola chiave nel campo di ricerca
- d. Selezionare l’immagine desiderata e dopo averla posizionata e ridimensionata, selezionare “Blocca Immagine”
- e. Fare tap con l’icona col + a sinistra in basso per aggiungere i riquadri interattivi (hotspot –max 25)
- f. Programmare le azioni dei riquadri interattivi

8. Modificare i parametri di accesso:

- a. Andare alla schermata iniziale
- b. Scegliere il pulsante "Impostazioni"
- c. Andare alla sezione "Impostazioni Utente"
- d. Abilitare la voce "È richiesta una password per uscire da"utente"
- e. Digitare una password

Per creare una **nuova attività**,
selezionare il segno + in alto a sinistra.



Digitare un nome e selezionare Crea.

Il nuovo titolo verrà visualizzato alla fine.



Selezionare il pulsante Modifica Pagina



Scaricare il demo di GoTalk

Versione GoTalk Now Lite per esplorare e valutare l'applicazione.

Permette di costruire solo 5 pagine che non si possono esportare.

Si scarica dallo store di Apple (solo per dispositivi iOS)

<https://apps.apple.com/us/app/gotalk-now-lite/id953164338>

Rivenditore in Italia

Per ulteriori informazioni, contattare
www.leonardoausili.com

Leonardo Ausionline srl

via Nobel, 88 C

42124 Reggio Emilia – ITALIA

tel. **0522/923770**

cell. 3408685900 fax 0522/272586

www.leonardoausili.com

e-mail: clienti@leonardoausili.com

pec: leonardoausili@pec.it

